

Caratteristiche tecniche

Utilizzo previsto	Endodonzia				
Indicazioni d'uso	Irrigazione agli ultrasuoni				
Descrizione	Le lime IrriSafe™ sono utilizzate per irrigare il canale radicolare a fine preparazione				
Tipo di punta	Lima				
Fattore allergizzante	Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b Composizione chimica del filo e del supporto di lima: <ul style="list-style-type: none"> • Nichel • Cromo 				
Riferimento commerciale	IRR25-21 : F43805				
Classe medicale	Il dispositivo medicale è classificato IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.				
Regolazioni	Gamma Newtron	Gamma P5	Suprasson P5 Booster	Prophy Max - P-Max - Implant Center 2 - Piezotome 2	Irrigazione
	9	9	7	5	

Durata di vita

Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta l'anno i dispositivi medicali abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.


Documentazioni associate

Nome del documento	Riferimenti
Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche	J00007
Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte	J02002
Scheda clinica IrriSafe	J08082
Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni	J58000
Manuale generale relativo alla gamma completa di punte dentali convenzionali	J02100


Sterilizzazione




Sterilizzare prima dell'utilizzo

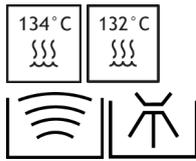


È necessario disinfettare, pulire e sterilizzare la punta prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, consultare i Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte J02002.

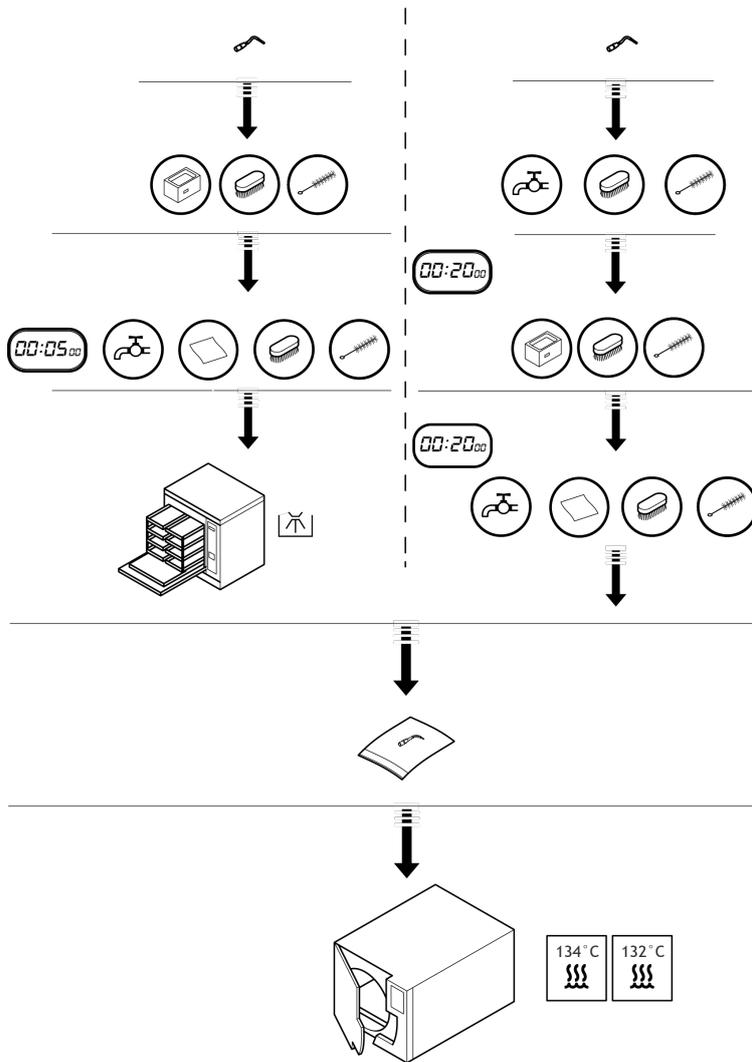

Posizionamento

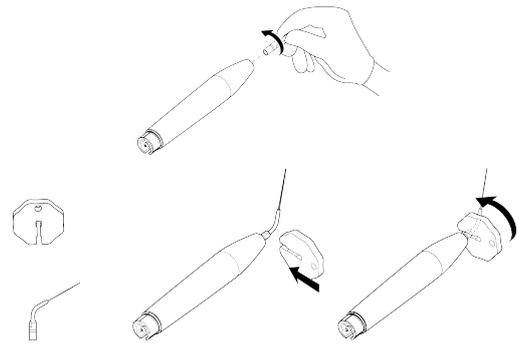

Smontaggio

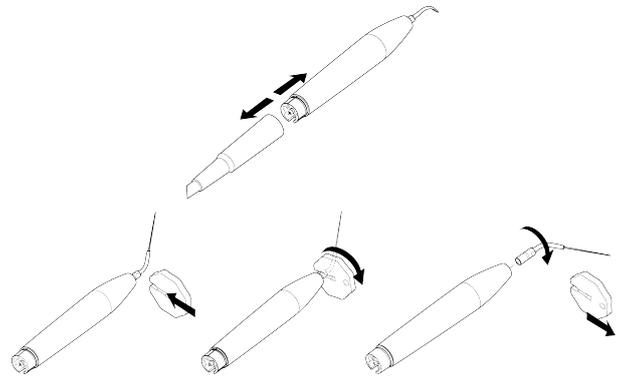

Identificazione del fabbricante



SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com



Data di prima apposizione della marcatura CE

2007



Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di

Lima | IRR25-21 | J00912 | (07) | V2 | 05/2018 | NB25IT090B

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download



Instructions For Use

