

Caratteristiche tecniche

Utilizzo previsto	Osteotomia			
Indicazioni d'uso	Osteotomia			
Descrizione	Scalpello piatto, per la realizzazione di osteotomie fini.			
Tipo di punta	Scalpello			
Fattore allergizzante	Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b L'acciaio chirurgico inossidabile contiene: <ul style="list-style-type: none"> • Nichel • Cromo 			
Riferimento commerciale	BS5 II : F87505			
Classe medicale	Il dispositivo medicale è classificato IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.			
Regolazioni	Generatori	Modalità massima	Regolazione fine massima	Irrigazione
	Implant Center II Piezotome 2 Piezotome Cube Piezotome Solo LED	D3	1-3	60 ml/min

Durata di vita

Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta l'anno i dispositivi medici abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.


Documentazioni associate

Nome del documento	Riferimenti
Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche	J00007
Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte	J02002
Scheda clinica Bone Surgery	J57302
Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni per la chirurgia intra-orale	J58010
Manuale generale relativo all'intera gamma delle punte dentali chirurgiche	J87302


Sterilizzazione




Sterilizzare prima dell'utilizzo

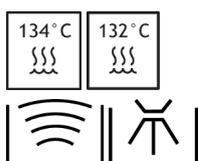


È necessario disinfettare, pulire e sterilizzare la punta prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, consultare i Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte J02002.

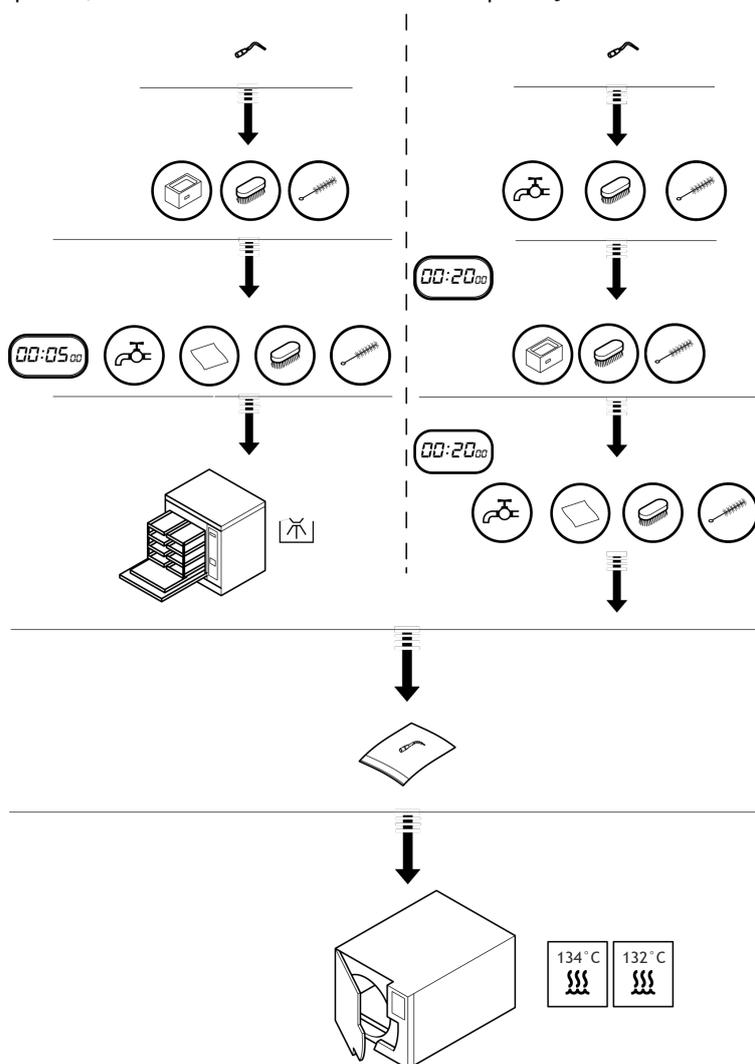

Posizionamento

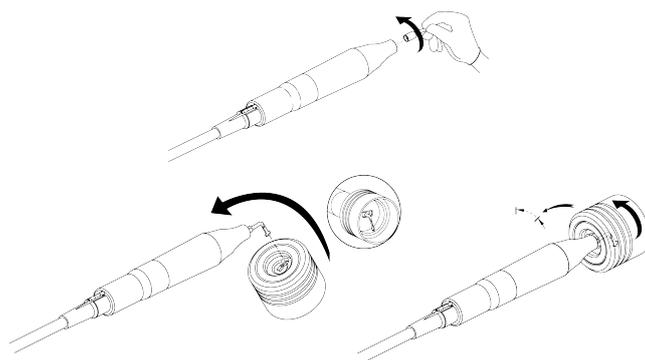

Smontaggio

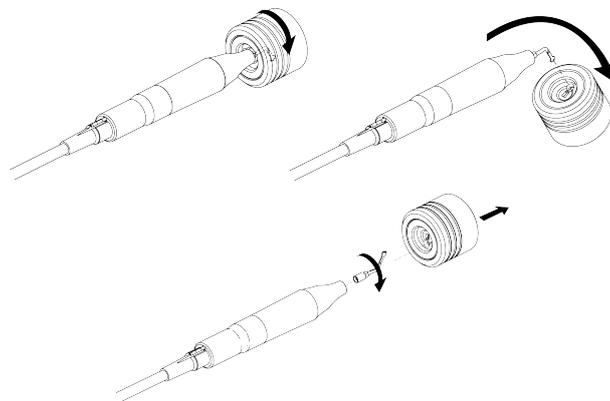

Identificazione del fabbricante



SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com



Data di prima apposizione della marcatura CE

2009



Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di

Punta | BS5 II | J01072 | (09) | V3 | 05/2018 | NO50IT120C

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCIA
Tel. +33 (0) 556 34 06 07 | Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com | www.acteongroup.com

Download



Instructions For Use

