

## Características técnicas

Utilização prevista	Descolamento da membrana			
Indicações de utilização	Elevação sinusal por via cristal			
Descrição	Ponta para descolamento da membrana sinusal. Complementar às pontas TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, para a preparação do canal de acesso. Nunca coloque a ponta TKW5 II, em vibração, em contacto directo com a membrana			
Tipo de ponta	Espátula			
Fator alergénico	Ponta fabricada com aço inoxidável cirúrgico, em conformidade com a norma ASTM F899 - 12b  O aço inoxidável cirúrgico contém: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Níquel</li> <li>• Crómio</li> </ul>			
Referência comercial	TKW5 II: F87535			
Classe médica	O dispositivo médico é classificado como IIa em conformidade com a norma europeia 93/42/CEE.			
Regulações	Geradores	Modo máximo	Regulação fina máxima	
	Implant Center II Piezotome 2 Piezotome Cube Piezotome Solo LED	D3	1	30-40 ml/minuto

## Vida útil

Como não é possível estabelecer um número máximo de utilizações, podendo variar em função de diversos parâmetros como a duração de utilização, a dureza dos tecidos, o esforço exercido ou o desgaste, recomendamos a renovação, pelo menos, uma vez por ano dos dispositivos médicos mais utilizados. Proceda à renovação do dispositivo médico se a ponta não vibra à frequência pretendida, o tratamento não decorre conforme o normal e demora mais tempo ou não avança.


## Documentações associadas

Nome do documento	Referências
Modo de consulta das instruções de utilização eletrónicas	J00007
Protocolos de limpeza, desinfeção e esterilização das pontas	J02007
Ficha clínica Intralift	J57327
Tabela de regulação da potência dos geradores de ultrassons de cirurgia intraoral	J58010
Manual de instruções geral relativo ao conjunto da gama de pontas dentárias de cirurgia	J87307


## Esterilização




Esterilizar antes da utilização

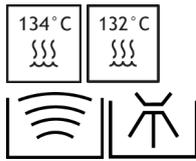


Deve desinfetar, limpar e esterilizar a ponta antes e depois de cada utilização. Antes de qualquer utilização, consulte os Protocolos de limpeza, desinfecção e esterilização das pontas J02007.

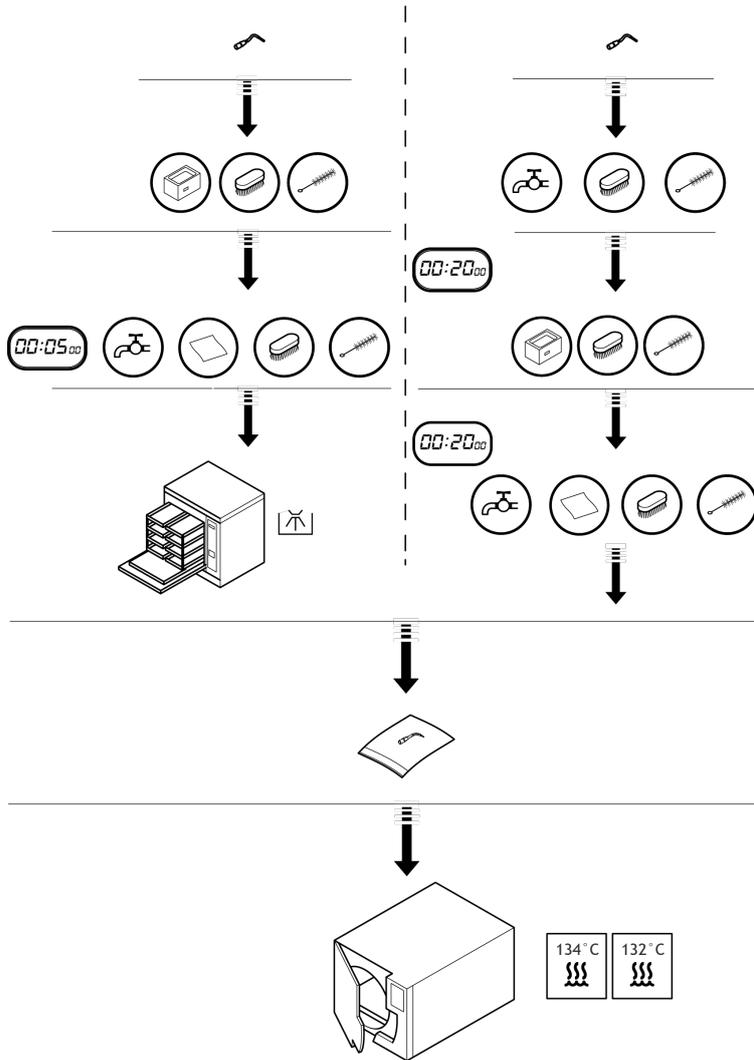

## Instalação

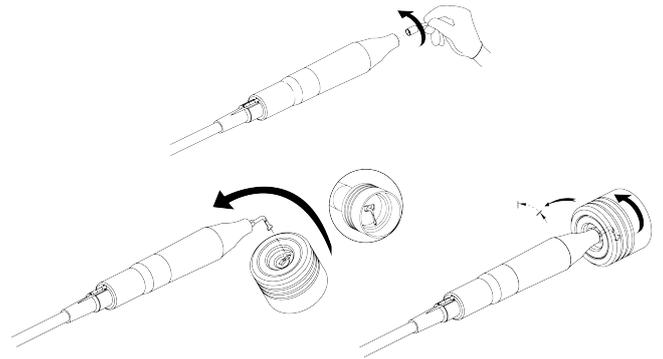

## Desmontagem

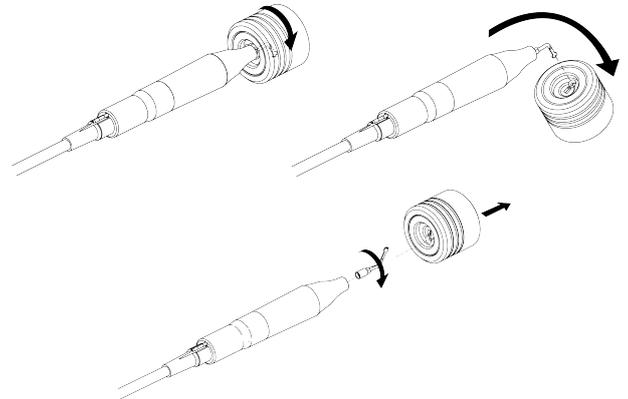

## Identificação do fabricante



SATELEC  
A Company of ACTEON Group  
17, avenue Gustave Eiffel  
BP 30216  
33708 MERIGNAC cedex  
França  
Tel. +33 (0) 556.34.06.07  
Fax: +33 (0) 556.34.92.92  
E-mail: [satelec@acteongroup.com](mailto:satelec@acteongroup.com)  
[www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)



## Data da primeira aplicação da marcação CE

2009



O médico deve visualizar continuamente o estado do local para detetar imediatamente qualquer risco de aquecimento.

Ponta | TKW5 II | J01157 | (09) | V3 | 05/2018 | NO50PT200C

SATELEC S.A.S. | A Company of ACTEON Group  
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANÇA  
Tel.: +33 (0) 556 34 06 07 | Fax: +33 (0) 556 34 92 92  
E-mail: [satelec@acteongroup.com](mailto:satelec@acteongroup.com) | [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

Download



Instructions For Use

